

蓋をしたまま飲める  
ふつてもたおれてもこぼれない

# Kiss

コップタイプ

約7.5cm~8cm  
コップ口径に対応



- 特許取得の独自構造で蓋をしたまま飲める
- ふつてもたおれても、逆さにしてもこぼれない
- やわらかいシリコンゴムでのみやすい
- 煮沸消毒・薬液消毒ができる衛生的

口外径7.5~8cm、とてまで1.3cm以上あるコップに対応



aha projects  
by I.C.I DESIGN

## セットのしかた

- ・ご使用前に、必ず十分に洗浄してください。
- ① コップ口径外径7.5cm~8cm、とてまでの距離が1.3cm以上ある、口元が平らなコップをご準備ください。
- ※ 対応サイズ内であっても、とての位置、いびつな形状、表面の凸凹の激しいもの、陶器製などざらざらした表面などコップの種類によって取り付けられないものがあります。
- ② 飲み口側の縁をコップに押さえつけ、ペロを引っ張りながらコップにかぶせます。必ず内部のカイドにコップの口があるように正しく被せてください。



- ※ 取り付けた後は指でまんべんなく押さえ、浮きがないことをお確かめください。
- ※ 蓋を取り付ける場合は、平らな机などにコップを置き取り付けてください。
- ※ ご使用になる前に、製品を取り付けたコップを傾けてもれのない事を確認してください。もれた場合は、再度セットしなおしてください。
- ※ 高い位置から落とすなど強い衝撃が加わるとシリコンキャップが外れる場合があります。

## お手入れについて

- ・ 使用後は、すぐにぬるま湯につけよく洗浄してください。長時間放置したままだと果汁などの色や臭いが付着する場合があります。素材の特性上、食材の色素で変色することがございますが、使用上は差しつかえありません。
- ・ 洗浄する時は、柔らかいスポンジと台所用洗剤できれいにあらってください。研磨剤入りのナイロンたわし、粒子の粗いクレンザーなどを使用するとキズがつくことがありますのでご注意ください。
- ・ 汚れが落ちにくい時は、台所用酸素系漂白剤を各漂白剤指定の濃度に薄めて使用ください。過度の漂白は製品を早く傷めますのでご注意ください。
- ・ 煮沸消毒をする時は、洗浄後、たっぷりのお湯で2~3分位行ってください。過度の煮沸は製品を早く傷めます。
- ・ 薬液消毒をするときは、各消毒液の使用方法に従いご使用ください。

### Kiss コップタイプ

品番 AK01  
原料樹脂 シリコンゴム 耐熱温度 -30°C

製品は消耗品です。1年を目安に、キズ、破損、表面のザラツキをご確認ください。安全にご使用いただくため、該当する場合は使用を中止してください。

## Kiss 取扱説明書

ご使用前に必ずよくお読みの上正しくお使いください。  
また、いつでも見られる場所に大切に保管してください。



飲み口に口をつけて、  
かるく噛むように飲んでください



※ シリコン特有のにおいを感じることがあります。気になる場合はたっぷりのお湯で30分ほど煮沸してください。



熱い飲み物は入れないでください。  
熱い飲み物が直接唇に触れたり口に入り、やけどの原因になります。また、飲み物が漏れ、やけどやものを汚す原因になります。

## ご使用上の注意



熱い飲み物は入れないでください。やけどの原因になります。また、容器内の圧力があがり飲み物が漏れ、やけどやものを汚す原因になります。



- ・ 飲み物を飲むためのものです。それ以外の目的には使用しないでください。
- ・ 火のそばに置かないでください。
- ・ 材料の性質上、小さな傷がもとで製品が破れたり裂けたりすることがあります。また、強い力で噛んだり、製品を無理に伸ばしたり、飲み口を無理に開いたり、飲み口に指や物を入れたりしないでください。破損の原因になります。
- ・ ご使用の度に、亀裂やキズなどの異常がないか確認してからご使用ください。ひび割れ、亀裂、キズが生じたり著しく変形した場合はすぐに使用を中止してください。
- ・ 古くなると弾力性がなくなり破れやすくなります。
- ・ コップの種類(とての位置・形状・陶器性・凸凹のはげしいもの)によって取り付けられないものもあります。
- ・ 製品をセットした状態で長時間飲み物をそのままにしないでください。製品を取付けたまま高温の場所に放置したり、温めたりしないでください。
- ・ 炭酸飲料、果肉入りの飲料、お茶の葉入りの飲料、熱い飲料には使用しないでください。
- ・ 製品をコップに取り付けた状態で持ち運ぶ際は、飲み口に物があたらないように入れてください。飲み物が漏れる原因になります。
- ・ 持ち運ぶ際は、必ずコップを持って運んでください。